

# AED Plus Trainer2

Trainen met behulp van volledige simulatiecontrole voor de instructeur



Een precieze, goed gecontroleerde en eenvoudige simulatie van het gebruik van een AED Plus® in een echte reddingssituatie.

## AED Plus Trainer2 bevat:

- AED Plus Trainer2 opleidings-AED
- Draadloze afstandsbediening
- Een set van AED Plus Training **CPR-D•padz**<sup>®</sup>
- CPR-D trainer gelpad vervangset
- 4 D celbatterijen
- 2 AA celbatterijen

### ZOLL Medical Corporation Hoofdkantoor

269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824  
978-421-9655  
800-348-9011

### ZOLL Internationale kantoren

Australië  
+61 2 8424 8700  
www.zoll.com.au

Canada  
905-629-5005  
www.zoll.com

China  
+86 21 6226 9505  
www.zoll.com

Duitsland  
+49 2236 87 87 0  
www.zollmedical.de

Frankrijk  
+33 (1) 30 05 14 98  
www.zoll.fr

Midden-Oosten en Afrika  
+96 278 800 4411  
www.zoll.com

Nederland  
Gemachtigde Vertegenwoordiger EU  
+31 (0) 488 41 11 83  
www.zoll.nl

Oostenrijk  
+43 650 413 6222  
www.zollmedical.at

Rusland  
+7495 936 2338  
www.zoll.com

Verenigd Koninkrijk  
+44 (0) 1928 595 160  
www.zoll.com

Voor adressen en faxnummers van dochterondernemingen en voor andere locaties over de hele wereld:  
[www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts)

## Volledige simulatiecontrole voor de instructeur

Met de ZOLL<sup>®</sup> AED Plus Trainer2 kunnen CPR- en eerstehulpinstructeurs hun cursisten leren op welke manier ze met de AED Plus een leven kunnen redden. Hierbij kunnen ze een keuze maken tussen vier verschillende vaste hulpscenario's of een volledig handmatige controle van de volledige hulpingreep. Met een draadloze afstandsbediening is het ook mogelijk meerdere AED Plus Trainer2's te bedienen.

Met deze eenvoudige afstandsbediening kunnen instructeurs in enkele seconden een eerstehulpingreep in scene zetten en downloaden naar de AED Plus Trainer2. De cursist drukt op de aan-uit knop van de Trainer2 unit om te beginnen. De instructeur bepaalt vervolgens of er schokken moeten worden toegediend bij de volgende gesimuleerde hartanalyse of niet, of de pads op de juiste manier zijn aangebracht of niet en of de Trainer2 unit reageert met: "DRUK HARDER" of "GOEDE COMPRESSIES".

Met behulp van de pauzeknop kan de instructeur de simulatie stoppen, overleg plegen met de cursist en daarna verdergaan, daar waar de training is gestopt.

De protocollen stemmen overeen met de normen van de International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), met de richtlijnen van de American Heart Association (AHA) en met die van de European Resuscitation Council (ERC) 2005.

De Trainer 2 is éénvoudig om te schakelen van de AHA naar de ERC 2005 Richtlijnen.

## AED Plus Trainer2 Specificaties

*Afmetingen:* 5,25" H x 9,5" B x 11,5" D (13,3 cm H x 24,1 cm B x 29,2 cm D).

*Gewicht:* 4 lbs 14 oz (2,2 kg).

*Voeding:* 4 D cellen (bijgeleverd) voor Training AED (Goed voor meer dan 100 opleidingsuren)

2 AA cellen (bijgeleverd) voor afstandsbediening

AC adapter niet beschikbaar – werkt alleen met batterijen.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

©2007 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. "Advancing Resuscitation. Today.", AED Plus, **CPR-D•padz** en ZOLL zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van ZOLL Medical Corporation.

Gedrukt in de VS, 060802 9656-0202-16



**ZOLL**<sup>®</sup>  
Advancing Resuscitation. Today.<sup>®</sup>